



**SAFECARE BIO-TECH**

# SAFECARE COVID-19 Ag

## COVID-19 Antigen Rapid Test Device(Swab)

Rychlý test na detekci Antigenu Covid-19 je laterální imunotest určený ke kvalitativní detekci antigenu nukleokapsidového proteinu z přímých nosních výtěrů nebo ze vzorků odebraných výtěrů z nosohltanu u jedinců podezřelých z nákazy koronavirem Covid-19 během prvních sedmi dnů od nástupu příznaků.




### SAFECARE COVID-19 Ag Rapid test kit

Účel použití: Detekce antigenu SARS-CoV2  
Balení: 25 testů  
Skladování: 4-30 °C  
Typ vzorku: Výtěr z nosohltanu  
Doba použitelnosti: 24 měsíců  
výsledek testu: 10-15 minut

## PŘÍPRAVA VZORKU A POSTUP ZKOUŠKY

### <Postup testu>

Příprava extrakčního roztoku

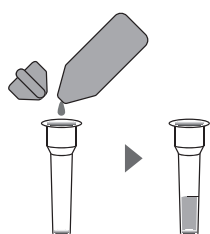


Do extrakční zkumavky přidejte 6 kapek extrakčního roztoku


Odběr tamponem z nosohltanu




Odeberte vzorek od pacienta pomocí přiloženého výtěrového tamponu

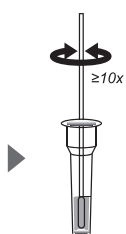


Promíchejte tampon s extrakčním roztokem

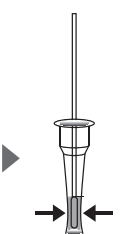

Stlačte zkumavku a vyjměte tampon, abyste z tamponu vytlačili tekutinu

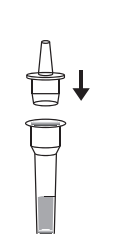


Nasadte víčko s kapátkem

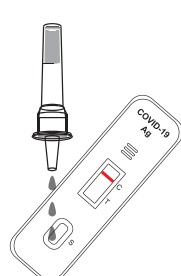

Kápněte 3 kapky vzorku do jamky na kazetě testu




10-15min


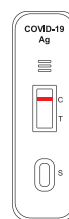


Odečtěte výsledek


## INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

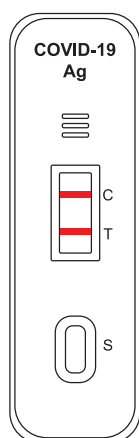


pozitivní

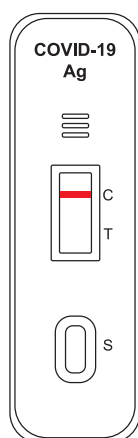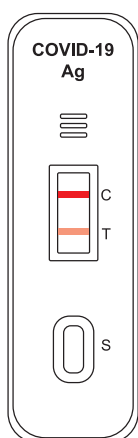

negativní

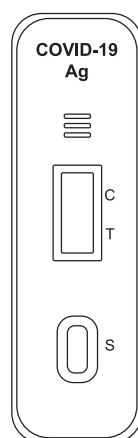

neplatný

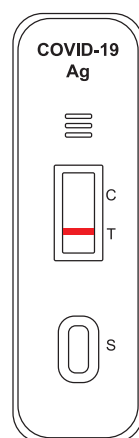

Výrobce: **Safecare Biotech Co., Ltd**

Dovozce do ČR: **IMMOMEDICAL CZ s.r.o.**

Tel.: **+420 239 042 466**

email: **info@immomedical.cz**